

BENEFÍCIOS



OLHOS SAUDÁVEIS

Menos Depósitos, Menor Irritação
= Maior Conforto



PROPRIEDADES DA SUPERFÍCIE

Notavelmente mais molhada e
lubrificada



MELHOR EXPERIÊNCIA DE USO

Aumento do conforto, mesmo após
longo tempo de uso



O QUANTO É CONFORTÁVEL?

Conte-nos respondendo a quatro
perguntas simples.
o-thp.com/survey

PARABÉNS!

Sua lente de contato personalizada é revestida com tecnologia Tangible Hydra-PEG™ para melhorar a umectabilidade, a lubricidade e a qualidade da sua superfície.

Para maximizar a vida útil do tratamento Tangible Hydra-PEG™, é muito importante seguir estas instruções de cuidado e manuseio das suas lentes.



MANUSEIE COM CUIDADO, AS LENTES SÃO ESCORREGADIAS

Tampe a pia para evitar a perda de suas lentes.

CUIDADO E MANUSEIO DAS SUAS LENTES



NÃO USE ÁGUA DE TORNEIRA

A água da torneira representa um risco para os olhos e pode danificar o revestimento da superfície da sua lente.

Use solução salina estéril e dentro do prazo de validade para enxaguar suas lentes.

Para mais informações visite este site:
o-thp.com/nowater



UTILIZE APENAS LIMPADORES APROVADOS PARA USO COM O TANGIBLE HYDRA-PEG™

Boston Simplus®	Bausch & Lomb
Menicon Unique pH	Menicon
Everclean	Alcon
Clear Care® Plus com HydraGlyde®	Alcon



AVISO!

Não utilize água de torneira, soluções de limpeza abrasivas ou que contêm álcool. Estas podem danificar ou destruir o revestimento Tangible Hydra-PEG™ e não devem ser utilizadas.

Exemplo de produtos que NÃO devem ser utilizados:

Boston® Advance	Bausch & Lomb
Progent	Menicon

Dúvidas sobre qual solução utilizar? Verifique em o-thp.com/solutions para mais exemplos de soluções aprovadas e não aprovadas. Sempre consulte seu oftalmologista sobre o uso correto das soluções e como lavar suas lentes com segurança. **Diga não à água de torneira!**

NOME DO PACIENTE

OFTALMOLOGISTA

 **MEDIPHACOS**
VISION IN EVOLUTION

©Contamac